

アイ-ラビュー7フルHD

(i-loview 7 Full HD)

取扱説明書



目次

1. 安全上のご注意	2
2. 付属品	4
3. お使いの前に	5
4. 各部の名称と操作	6
5. 便利な機能	10
6. 仕様	14
7. 保証規定	15

1. 安全上のご注意

【 注意記号 】



火災



感電

【 行為禁止記号 】



禁止



分解禁止



水濡れ禁止



強制



接触禁止



警告

●本機を、ストーブ・パネルヒーターの近く、または日光の直接あたる場所に置かないでください。



●本機を、ほかの電子機器または適切に保護されていない医療機器の近くで使用しないでください。



電子磁気的な妨害が発生するおそれがあります。

●本機を分解しないでください。修理が必要な場合には、お求めになった販売店またはメディアまでご連絡ください。また、分解した形跡がある場合は保証が無効になります。



●同梱されている電源アダプターを必ずご使用ください。



●濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



●気温 0 度以下または 35 度以上の環境では、本機を使用しないでください。



●本取扱説明書に従わずに本機を使用する場合には、保証は無効になります。



注意

●本機をほかの場所に移動させる場合は、まず電源コード
そのほかのケーブルを外部コネクタから外してから移動してください。



●本機を掃除する前に、必ず電源を取り外してください。
外側を掃除するためには、やわらかい布をお使いください。



洗剤や研磨剤は、本機を故障させる原因となりますので、使用しないでください。

2. 付属品

アイ-ラビュー7 フル HD をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。パッケージには次のものが入っていますのでご確認ください。

- ・ 本体
- ・ 取扱説明書（本書）
- ・ HDMI ケーブル
- ・ キャリングケース
- ・ 電源アダプター
- ・ SD カード
- ・ クリーニングクロス
- ・ 保証書

3. お使いの前に

- 本機をはじめて使用する前に充電してください。



本体の電源ポートに電源アダプターを接続し、電源アダプターをコンセントに接続してください。

バッテリーの満充電には約 4 時間かかり、約 3.5 時間使用できません。

- 画面の保護シールをはがしてください。

- カメラに指紋や汚れがついたときは付属のクリーニングクロスで拭きとってください。

4. 各部の名称と操作

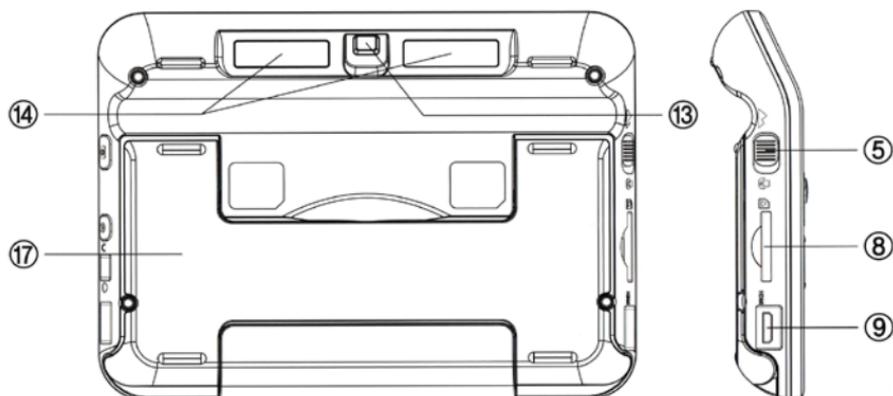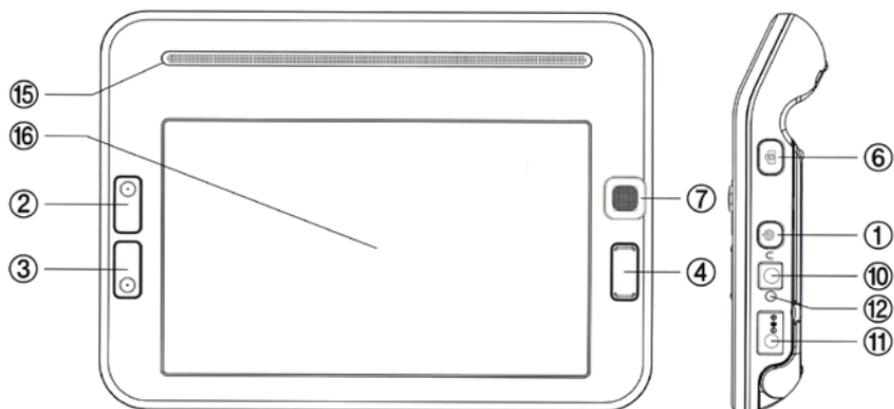

① 電源ボタン

3 秒間電源ボタンを押し続けると電源が入ります。

電源を消すには、同じく電源ボタンを 2 秒間押し続けてください。

② 拡大+ボタン

ボタンを押すと画面上に表示している画像を拡大できます。

③ 縮小-ボタン

ボタンを押すと画面上に表示している画像を縮小できます。

* 拡大倍率は 0.3 倍から 50 倍までです。

* スタンド利用時の拡大倍率は 1.8 倍から 50 倍です。

④ カラーモードボタン

画面上に表示している画像の色を変更できます。

- ・フルカラー
- ・黒い背景に白のテキスト
- ・白い背景に黒のテキスト
- ・黒い背景に黄色のテキスト
- ・黄色い背景に黒のテキスト
- ・黒い背景に緑のテキスト
- ・黄色い背景に青のテキスト
- ・青い背景に黄色のテキスト

⑤遠近切換えスイッチ

近くの対象物を見るときと遠くの対象物を見るときに切替えます。

近距離（花のアイコン）

本体から 1m の範囲内のものを見るとき。

遠距離（山のアイコン）

本体から 1m 以上離れたものを見るとき。

⑥スナップショットボタン

ボタンを押すと今見ている画像が固定されます。拡大率や表示モードの変更もできます。

もう一度ボタンを押すと固定の解除ができます。

⑦ジョグボタン

ジョグボタンは上下左右に動き、押し込むことができます。

画像の表示中、スナップショット中、写真の表示中には、上下左右に移動できます。

メニュー画面表示中は、上下でメニュー内容を選び、メニューを変更するときは左右で選びます。ボタンを押し込むと、決定されます。

⑧SD カードスロット

本機で撮影した画像を保存するための SD カードを挿入します。

⑨HDMI 端子

付属の HDMI ケーブルで、HDMI 端子付きの TV モニターに画像を出力します。

* 出力時は、画像の拡大・縮小・固定のみ機能します。

⑩イヤホン端子

⑪電源ポート

付属の電源アダプターを差し込み、充電します。

⑫充電ランプ

赤に光っていると充電中、充電が完了すると緑に光ります。

⑬カメラ

カメラに指紋や汚れがついたときは付属のクリーニングクロスで拭きとってください。

⑭LED ライト

⑮スピーカー

⑯画面

⑰スタンド

本を読むときや、筆記するときに立ち上げて利用してください。

5. 便利な機能

●効果音を消す・出す

拡大+ボタンを押しながら、カラーモードボタンを3秒以上押しします。

●充電状況の確認

電池残量が30%以下になると充電ランプが光ります。

詳しい情報の確認は、カラーモードボタンを押しながら3秒以上ジョグボタン押しと画面上に表示されます。表示を消すときはもう一度同じ操作をしてください。

●イメージの保存

スナップショットボタンを3秒以上押しと画面にカメラマークが出てSDカード内に画像が保存されます。

●写真の再生

縮小+ボタンとジョグボタンの右を同時に3秒以上押しとSDカードに保存された画像を表示できます。

* 詳細はメニュー内の写真の再生へ（11ページ）

●個人設定を戻す

縮小+ボタンとジョグボタンの下を同時に3秒以上押しと保存されている個人設定に戻ります。

* 詳細はメニュー内の個人設定へ（13ページ）

●工場出荷時へのリセット

ジョグボタンを上にも倒しながらカラーモードボタンを3秒以上押します。

●省電力モード

3分間動作させずに置いておくと省電力モードになります。さらに3分たつと自動的に電源が切れます。

●メニュー

縮小ボタンとカラーモードボタンを同時に3秒以上押すとメニューが表示されます。もう一度同じボタンを押すとメニューから抜けます。

メニュー内容はジョグボタンの上下で選択できます。

写真の再生



メニューの最初は Playback と表示されます。写真の再生です。ジョグボタンを押し込むと、SD カードに保存した画像を表示でき、ジョグボタンの左右で選択できます。選択した画像は、色の変更と拡大ができます。スナップショットボタンを押すことで元の大きさに戻せます。



見ている画像を消すときはジョグボタンを押し込み、ごみ箱を出し、ジョグボタンで YES にして押し込みます。消さないときはジョグボタンで NO にして押し込みます

画面の明るさ



Screen Brightness で画面の明るさを変更できます。ジョグボタンの左右で 5 段階に調節できます。

LED ライトを点ける・消す



LED Light で背面のライトを消せます。ジョグボタンの左右で点ける・消すを選択できます。

効果音量調節



Sound Volume で効果音量を調節できます。ジョグボタンの左右で 5 段階に調節できます。

個人設定



Personal Settings でカラーモード、画面の明るさ、LED ライトの状態、効果音量を保存できます。ジョグボタンの SAVE で現在の設定を保存できます。return を選択すると前回保存した状態に戻ります。

6. 仕様

1. 拡大倍率 : 0.3~50 倍 (スタンド使用時 1.8~50 倍)
3. 外形寸法 : 200×146×25mm (幅×奥行×高さ)
4. カラーモード : 8 種類 (フルカラー、黒に白、白に黒、黒に黄、黄に黒、黒に緑、黄に青、青に黄)
5. フォーカス : 自動フォーカス
6. 画面 : 7 インチワイド TFT-LCD
7. 画像出力 : HDMI
9. SD カード : 64GB までサポート
10. バッテリー : リチウムバッテリー (3.5 時間の連続使用)
11. 電源アダプター : 入力 : AC110~240V,出力 : DC5.0V,1A
12. 充電時間 : 4 時間
13. 重量 : 約 535g
14. 操作及び保存条件 : 気温 : 0~35°

7. 保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内（本体 1 年・内臓バッテリー 6 ヶ月 / AC アダプタを除く）に故障が発生した場合には無料修理します。

2. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。

（1）ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障・損傷

（2）お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障・損傷

（3）火災・地震・水害・落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障・損傷

（4）接続している他の機器に起因する故障・損傷

（5）業務用の長時間使用など、特に過酷な条件下において使用された場合の故障・損傷

（6）液体（水やコーヒーやソフトドリンクなど）により故障・損傷した場合、水濡れによる故障・損傷

アイ-ラビュー7 フル HD 取扱説明書

2016 年 1 月版

株式会社アメディア

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 1-15-6 第 10 秋山ビル 1 階

電話 : 03-6915-8597 FAX : 03-3994-7177

<http://www.amedia.co.jp/>

