

高性能電子ルーペ

# 文星

取扱説明書





## 目次

1.	基本的な説明	3
	(1) 本体について	3
	(2) ボタンについて	5
	(3) 接続口について	7
2.	基本的な操作方法	9
3.	拡大機能	10
4.	設定機能	11
5.	音楽機能	12
6.	録音機能	13
7.	ファイル機能	14
8.	仕様	15
9.	保証規定	16

## 付属品

文星をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
パッケージには次のものが入っていることをご確認ください。  
い。

- ・ 本体
- ・ 説明書（本書）
- ・ 保証書兼ユーザー登録ハガキ
- ・ AC アダプター
- ・ USB 接続ケーブル
- ・ ストラップ
- ・ イヤホン
- ・ テレビ接続用 AV ケーブル
- ・ HDMI 接続ケーブル
- ・ キャリングポーチ

# 1. 基本的な説明

## (1) 本体について



- 01. 拡大・縮小ボタン
- 02. 色変更ボタン (C)
- 03. マイクロSDカードスロット
- 04. AV/イヤホンジャック
- 05. USB ポート
- 06. HDMI ポート
- 07. 上下左右移動ボタン
- 08. 確定ボタン
- 09. メインメニューボタン (M)
- 10. 明るさ調整ボタン



11. スピーカ 12. リセット穴 13. 電源ボタン 14. マイク  
15. ロックボタン 16. カメラボタン 17. スタンド  
18. LED ライト 19. カメラ

## (2) ボタンについて

記号	ボタンの名称	機能
	電源ボタン	本機電源のオン/オフ
↑	上移動ボタン	設定項目の移動 音楽/録音ファイルの再生音量 アップ
↓	下移動ボタン	設定項目の移動 ファイル機能時は保存画像の 一覧表示 音楽/録音ファイルの再生音量 ダウン
→	右移動ボタン	メインメニュー機能選択 音楽再生時は曲の切り替え 録音メニュー時は保存した録 音ファイルの呼び出し 録音ファイルの切り替え
←	左移動ボタン	メインメニュー機能選択 音楽再生時は曲の切り替え 録音メニュー時は保存した録 音ファイルの呼び出し 録音ファイルの切り替え 長押しで、削除メニューの呼び 出し

●	確定ボタン	機能/メニューの確定 音声/録音ファイルの再生/ 一時停止 録音の開始/終了
M	メインメニューボタン	メインメニュー画面に戻る 音楽再生時は音楽一覧画面に戻る
HOLD	ロックボタン	電源ボタン以外をロック
	カメラボタン	拡大機能時、画像固定/写真撮影
+	拡大ボタン	拡大機能時、拡大
-	縮小ボタン	拡大機能時、縮小
C	色変更ボタン	拡大機能時、画面表示の色変更
	ライトボタン	拡大機能時、ライトの明るさを調整
RESET	リセット穴	本機を正常な状態に戻す

### (3) 接続口について

#### USB ポート :

付属の USB ケーブルでパソコンに接続すると、ストレージ機器として認識され、本機に保存したデータの確認や転送ができます。

#### HDMI ポート :

付属の HDMI ケーブルを利用し、外部モニターとつなげると、本機の画面表示が消え、外部モニターに画像が出力されます。

\* HDMI ポートを利用するときは、イヤホンジャックは利用できません。

\* 接続には付属の HDMI ケーブルをご利用ください。

#### AV/イヤホンジャック :

付属のテレビ接続用 AV ケーブルまたはイヤホンを差し込むと、画面上に画面とヘッドホンのアイコンが出てきます。外部モニターに AV 出力をするときは、左側の「画面アイコン」を左右移動ボタンで選択し、確定してください。

イヤホンへの音声出力をするときは、右側の「ヘッドホンアイコン」を左右移動ボタンで選択し、確定してください。

\* AV 出力利用時は付属のテレビ接続用 AV ケーブルをご利用ください。

**\* ご注意 \***

HDMI・AV 接続は拡大機能とファイル機能のみで利用可能です。

HDMI ケーブルや AV ケーブルを抜くときは、本機の電源を切ってから抜いてください。

マイクロ SD カードスロット (TF) :

32G 以下のマイクロ SD カードを挿入して、本機メモリの拡張ができます。

カードが入っていない時は自動的に本機内蔵メモリを優先し、ファイル、音楽 (MP3)、録音は本機内蔵メモリに保存されます。

マイクロ SD カードが入っている時は、マイクロ SD カードに保存されます。

**\* ご注意 \***

- ・ マイクロ SD カードが本機に入っている時は、本機内蔵メモリに保存したファイルは認識できません。
- ・ 使用中はマイクロ SD カードを抜かないでください。必ず電源を切ってから抜いてください。

## 2. 基本的な操作方法

電源のオン/オフ：

- ・電源ボタンを2秒押ししてください。電源投入後は、メインメニューが表示されます。

メニュー選択：

- ・左右移動ボタンで、拡大・ファイル・設定・録音・音楽の順で機能の選択ができます。  
確定ボタンを押すと、選択された機能に入ります。
- ・メインメニュー(M)ボタンでメニュー選択に戻れます。

充電：

- ・USBポートにUSBケーブルとACアダプターを差し込むと充電できます。充電中は、メニューボタン左にあるライトが赤く光ります。
- ・充電時間約4時間、連続使用時間約4時間です。

リセット：

- ・異常な動作があった時、リセット(RESET)穴にクリップの先を差し込みむと再起動できます。

### 3. 拡大機能

メインメニューで拡大を選択し、確定します。

拡大/縮小：

- ・ 拡大ボタンを押すと拡大します。縮小ボタンを押すと縮小します。倍率は5.5～23倍です。
- \* 拡大機能ご利用の場合、必ずスタンドを開いてください。

表示色の変更：

- ・ 色変更ボタン（C）を押すと、画面表示色の変更ができます。カラー、黒字白背景、白字黒背景、黄色字黒背景、黄色字青背景、黒字黄色背景、青色字黄色背景、青色字白背景、白字青色背景があります。

明るさ調整：

- ・ 背面ライトの明るさ調整ができます。高、中、低、消灯の調整が可能です。

画像固定/写真撮影：

- ・ 拡大機能を使用の際、カメラボタンを押すと画像の固定ができます。
- ・ 画像の固定後、電源ボタン・メインメニューボタン・ライトボタン以外のボタンを押すと画像を保存するか選択できます。左右移動ボタンで、画面上に表示される“”マークを選択し、確定で保存できます。“”マークを選択すると保存しません。
- ・ 保存した画像は、ファイル機能で確認できます。

## 4. 設定機能

メインメニューから設定を選択し、確定します。

### 設定内容

動作音：音量大、音量小、オフの設定ができます。

起動アニメ：オン、オフの設定ができます。

言語：日本語・中国語・英語の選択ができます。

自動電源オフ：オフ・90 秒・180 秒の設定ができます。

時間設定：本機の日付と時間の設定ができます。

テレビ出力：NTSC, PAL の選択ができます。

初期化：挿入したマイクロ SD カードの初期化ができます。

工場設定：工場出荷時の設定に戻します。

光源周波数：50HZ, 60HZ の設定ができます。

\* 画面にちらつきが出る場合、周波数を変更してください。

Ver 情報：現在バージョンの確認とファームウェアのアップデート

\* アップデートは弊社 WEB サイトから提供します。

パソコンにてダウンロードし、マイクロ SD カードに保存して、本機で実行します。

## 5. 音楽機能

メインメニューから音楽を選択し、確定します。

音楽一覧時の基本操作：

- ・上下移動ボタンで、音声ファイルの選択ができます。確定ボタンで、選択した音声ファイルの再生が始まります。
- ・右移動ボタンの長押しで、現在選択している音声ファイルを削除できます。左右移動ボタンで“☑”マークを選択して確定ボタンを押すと、選択したファイルを削除できます。“☒”マークの選択で削除はしません。

音楽再生時の基本操作：

- ・確定ボタンで、再生/一時停止できます。
- ・上下移動ボタンで、音量の調整ができます。
- ・左右移動ボタンで、次曲・前曲の移動ができます。
- ・確定ボタンの長押しで、通常再生/1曲リピート/1曲再生の選択ができます。

音楽ファイルの転送：

本機とパソコンを付属の USB ケーブルで接続し、マイコンピュータにて、本機の MUSIC フォルダーに MP3 ファイルをコピーしてください。

\* 音楽は MP3 形式のみ再生可能です。

## 6. 録音機能

メインメニューから録音を選択し、確定します。

録音画面時の基本操作：

- ・確定ボタンで、録音の開始と終了ができます。録音の終了後、自動的に保存されます。
- ・次の録音をするときはメインメニュー（M）ボタンでメインメニューに戻り、再び録音機能に入ってください。

録音ファイル再生時の操作：

- ・左右ボタンで録音ファイルを選択し、確定ボタンで再生/一時停止できます。
- ・上下移動ボタンで音量の調整ができます。
- ・左移動ボタンの長押しで、現在選択している録音ファイルを削除できます。左右移動ボタンで“☑”マークを選択して確定ボタンを押すと、選択したファイルを削除できます。“☒”マークの選択で削除はしません。

## 7. ファイル機能

メインメニューからファイルを選択し、確定します。  
拡大機能で保存した画像を確認することができます。

基本操作：

- ・ 左右移動ボタンで保存した画像を切り替えます。
- ・ 下移動ボタンを押すと保存した画像の一覧表示になります。

上下左右移動ボタンで目的の保存した画像を選択して、  
全画面表示ができます。

- ・ 閲覧時、拡大・縮小ボタンで保存した画像の拡大縮小  
ができます。

拡大後、上下左右移動ボタンで画像のスクロールが  
できます。

## 8. 仕様

外寸：150x80x24 (mm)

重さ：250g (内蔵電池を含む)

電池：リチウムイオン充電電池 1500mAh

内蔵メモリ：32MB

対応マイクロ SD カードの最大容量：32GB

内蔵スピーカ：20x30mm (1 個)

LED：4.3 インチ液晶 解像度 800x480 (ピクセル)

カメラ解像度：5M ピクセル

## 9. 保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内（本体1年）に故障が発生した場合には無償修理します。
  
2. 次の場合には保証期間内でも有償修理となります。
  - (1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障・損傷
  - (2) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障・損傷
  - (3) 火災・地震・水害・落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障・損傷
  - (4) 接続している他の機器に起因する故障・損傷
  - (5) 業務用の長時間使用など、特に過酷な条件下において使用された場合の故障・損傷
  - (6) 液体（水やコーヒーやソフトドリンクなど）により故障・損傷した場合、水濡れによる故障・損傷

## 文星取扱説明書

---

2013 年 4 月版

---

株式会社アメディア

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 1-15-6 第 10 秋山ビル 1 階

電話 : 03-6915-8597      FAX : 03-3994-7177

<http://www.amedia.co.jp/>

---

