携帯型電子ルーペのデジルーペ(以下「本製品」)を お選びいただきありがとうございます。

本製品の使用にあたって、ご質問、ご感想などがありましたら、販売店、またはアメディアまでご連絡ください。

本取扱説明書は、本製品の特徴と操作について説明 しております。ご使用の前に、必ず本取扱説明書を、 お読みください。

また、いつでも参照するために、本取扱説明書を、 お手元に保管しておいてください。

#### 2. ご注意

※ここに示した注意事項は安全に関する内容を記載しています。

お使いになる前によくお読みのうえ、正しくお使い ください。

- ●本製品を急激な極端な気温や湿度の変化がある環境では使用しないでください。
- ●本製品をストーブ・パネルヒーターの近く、また は日光の直接あたる場所に置かないでください。故 障の原因になるおそれがあります。
- ●本製品は大切にご使用ください。

乱暴な使用は、内部部品などの故障の原因になります。

- ●本製品を分解しないでください。修理が必要な場合には、お近くの販売店またはアメディアまでご連絡ください。
- ●どの箇所も開けないでください。開けた場合には、 保証が無効になります。
- ●洗浄剤または研磨剤は、本製品を故障させるので、 使用しないでください。またカメラのレンズに直接 触らないようにしてください。
- ●同梱されている AC アダプタをご使用ください。
- ●本製品を強くたたいたり振動させたり抑えたり落としたりしないでください。
- ●本製品を氷点下 1 度以下や 41 度以上または多湿な場所での保管、使用は避けてください。
- ●本取扱説明書に従わない本製品の使用の場合には、 保証は無効になります。


## 3. パッケージの内容

本製品パッケージには次のものが入っています。

- 1) デジルーペ本体
- 2) リストバンド
- 3) USB B タイプケーブル
- 4) USB-AC アダプタ
- 5) 脱着式スタンド
- 6) キャリングケース
- 7) 取扱説明書(本書)兼 保証書

万が一パッケージに入っていないものがあれば、 販売店または、アメディアまでご連絡ください。

#### 4. 各部の名称

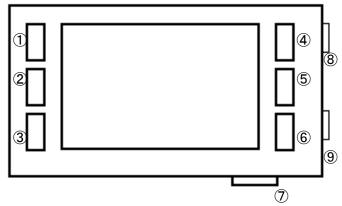

## ① 明るさ調節

キーを押すごとに画面が明るくなります。4段階で調節でき、一番明るい状態から更にキーを押すと一番暗い状態になります。

## ② 画面固定

現在、表示している画面を固定します。再度、押すと固定が解除されます。

#### ③ コントラスト調節

キーを押すごとにコントラストが高く(白い部分はより白く、黒い部分はより黒く)なります。一番高い状態から更にキーを押すと一番低い状態になります。

## ④ 倍率上げ

キーを押すごとに倍率が高くなります。2 倍、4 倍、6 倍、8 倍、12 倍、16 倍、24 倍、32 倍の 8 段階です。

# ⑤ 表示切替

キーを押すごとにカラー表示、白黒反転、白黒、グレースケールの順に切り替わります。グレースケールの状態から更にキーを押すとカラー表示に戻ります。

# ⑥ 倍率下げ

キーを押すごとに倍率が低くなります。

#### (7) 電源キー

スライド式で右にスライドさせると OFF、左にスライドさせると ON です。

## ⑧ USB 接続口

本製品を充電するときに使用する USB B タイプの接続口です。

#### 9 充電ランプ

充電中はランプが点灯します。充電が完了すると消灯します。

USB B タイプのケーブルの片方を USB-AC アダプ タに接続します。もう片方を本製品の右側面にある USB 接続口に接続します。USB-AC アダプタに収納されているコンセント部分を広げて家庭用コンセントに接続します。パソコンで充電する場合は、USB-AC アダプタは不要です。

充電時間はバッテリーが空の状態から、最大で約4時間です。連続使用(明るさ最小状態)で約3時間動作します。

長時間、本製品を使用する際は、脱着式のスタンドをセットすると便利です。

スタンドの一部かけているところが右下になるようにスタンドをおきます。次に、本製品の電源キーが右下になるようにしてスタンドの上部分に本製品の上部分を内側から入れ、本製品の下部分を上から押し込むとセットできます。

## 6. 操作

#### ①電源 ON/OFF

本製品の電源を入れるには、電源キーを左側にスライドさせます。電源を切る時は、右側にスライドさせます。

- ②見やすい明るさ、コントラスト、画面表示にあわせます。
- 4. 各部の名称を参考に、見やすい画面状態にします。
- ③倍率の切替
- 4. 各部の名称を参考に、見やすい文字の大きさに 調整します。

## 7. 仕様

拡大率	2 倍、4 倍、6 倍、8 倍、 12 倍、16 倍、24 倍、 32 倍の8 段階
液晶	3.5 インチ TFT
色表示	カラー、白黒、白黒反転、 グレースケール
静止画像	可能
バッテリー	リチウム
連続使用時間	約3時間
充電時間	約4時間
本体サイズ	110×74×15mm (幅×奥行×高さ)
重量	110g

AC アダプタ入力	5V 400mA
使用環境条件	気温:0度~40度 湿度:70%以下(ただし 結露のないこと)

#### 8. 保証について

保証期間は半年間です。故障の際は、お求めになった販売店もしくは株式会社アメディアまでご連絡ください。

## 保証書

日から半年間

- 製品名 デジルーペ
- •保証期間 年 月
- ご住所
- お名前
- 電話番号
- 販売店名

# デジルーペ 取扱説明書

2013年12月版

## 株式会社アメディア

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 1-15-6 第 10 秋山ビル 1 階

電話: 03-6915-8597 FAX: 03-3994-7177

http://www.amedia.co.jp/

# デジルーペ 取扱説明書兼保証書